



Персональный алкотестер Динго А-065

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Упаковка.....	4
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5
2.1 Важные предупреждения.....	6
2.2 Порядок работы	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	8
Приложение 1. Декларация о соответствии	11

Поздравляем Вас с приобретением алкотестера Динго А-065. Он определит содержание алкоголя у Вас в крови в течение нескольких секунд.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго А-065 (далее – алкотестер). Перед использованием прочтите, пожалуйста, данное руководство.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Алкотестер Динго А-065 представляет собой персональный анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Измеренное значение концентрации паров алкоголя в легких пересчитывается в концентрацию в крови и выводится на трехразрядный цифровой дисплей в единицах г/л (или промилле - грамм алкоголя в литре крови) .

1.2 Технические характеристики

тип датчика	полупроводниковый
дисплей	3-разрядный цифровой с подсветкой
продувание	без мундштука
дискретность шкалы	0,01 промилле
диапазон показаний	0,00–4,00 промилле
минимальная концентрация алкоголя	0,10 промилле
время установки показаний	2 секунды
время подготовки	до 30 секунд
рабочая температура	0–40°C
питание	2 батарейки AA
размеры	103 x 40 x 18 мм
вес	90 г
периодичность тех. обслуживания	300 тестов или раз в 12 месяцев
срок службы	3 года
продолжительность работы без замены батареек	около 100 тестов

1.3. Упаковка

В комплектации: алкотестер, 2 батарейки AA, 5 мундштуков, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:



1. Необходимо выждать не менее 20 минут после употребления алкоголя, пищи или курения прежде чем приступать к продуванию. В противном случае алкотестер может выдать неправильные показания, либо это может привести к повреждению чувствительного к алкоголю датчика.
2. Для каждого повторного измерения используйте новый мундштук.
3. Для питания используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки.
4. Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести прибор из строя.
5. Не храните прибор вблизи от источников запахов (косметичка) или нагревательных приборов.
6. Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром или в помещении с загрязненной атмосферой.
7. Для сохранения точности показаний рекомендуется настраивать (менять сенсорный элемент) приблизительно через каждые 300 тестов, либо раз в год, а также при появлении предупреждающей надписи на дисплее.
8. Диабет, низкокалорийная диета и некоторые другие факторы, приводящие к повышению концентрации кетонов в выдохе, могут вызывать ложно-положительные результаты. Проконсультируйтесь с врачом.
9. Срок службы датчика и точность показаний существенно уменьшаются при:
 - а) продувании через прибор предельных концентраций алкоголя
 - б) использовании алкотестера для массовых проверок

10. Алкотестер Динго А-065 не предназначен для профессиональной деятельности. Показания прибора не являются доказательными – независимо от количества выпитого спиртного не следует садиться за руль.

2.2 Порядок работы

2.2.1 Включение

Перед началом работы вставьте в прибор две щелочные батарейки АА (пальчиковые) и новый мундштук.

Для включения нажмите кнопку и удерживайте ее до появления индикации на дисплее и одиночного звукового сигнала. Сначала появятся все символы, затем часть из них потухнет и начнется обратный отсчет до нуля, сопровождаемый мигающей надписью WAIT (Ждите). В течение этого времени происходит самотестирование прибора и разогрев датчика. По завершении отсчета прозвучит двойной звуковой сигнал готовности к продуванию, исчезнет надпись WAIT и в правом нижнем углу загорится знак единицы измерения ‰ .

2.2.2 Проведение теста

Необходимо производить продувание в эллипсоидную воронку над дисплеем с расстояния примерно 2 см непрерывно с умеренной силой в течение около 4 секунд. Правильный выдох сопровождается продолжительным звуковым сигналом, по окончании выдоха прозвучит двойной сигнал. При срыве теста из-за преждевременного прекращения или недостаточной силы выдоха на дисплее высвечивается «F».

2.2.3 Считывание результатов

При нормальном завершении продувания на дисплее высвечивается значение концентрации алкоголя в крови.

2.2.5 Выключение

Показания остаются на дисплее в течение 10 секунд, затем прибор автоматически выключается. Также Алкотестер Динго А-065 можно

выключить в любой момент нажатием кнопки включения.

Если не осуществить продувание в течение 40 секунд после достижения готовности, он выключится автоматически.

2.2.6 Замена батареек

Если прибор не включается или на дисплее не гаснет символ батарейки, необходимо заменить батарейки. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.

Внимание! Меняйте обе батарейки одновременно. Используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки. Показания прибора с разряженными батарейками могут не соответствовать реальным.

3. техническое обслуживание

Техническое обслуживание анализатора производится с целью обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации. Алкотестер Динго А-065 поступает в продажу с заводской калибровкой, производящейся на специальном оборудовании. В процессе работы чувствительный к алкоголю датчик прибора изнашивается, что приводит к постепенному росту погрешности измерений. Для восстановления точности необходимо время от времени проводить настройку алкотестера в специализированном сервисном центре. Периодичность технического обслуживания зависит, в основном, от интенсивности использования прибора. В среднем необходимо производить настройку или замену сенсора через каждые 300 тестов, либо раз в год, а также при появлении надписи «CAL» или «E» на дисплее, означающей, что прибор нуждается в сервисе.

При условии соблюдения всех вышеперечисленных правил пользования прибором, до истечения гарантийного срока все виды работ по техобслуживанию данного алкотестера выполняются бесплатно в сервисном

центре (далее СЦ) ООО «СИМС-2», за исключением регламентного технического обслуживания, связанного с естественным износом сенсора.

Наш адрес:

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6,

Телефон: (495) 792-31-90 (многоканальный)

e-mail: support@alcotester.ru

4. условия гарантии

Условия гарантии

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии, за исключением технического обслуживания, вызванного естественным износом датчика.

Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных сервисных центрах.

Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение из СЦ осуществляется силами и на средства покупателя.

Срок гарантии – 12 месяцев.

Внимание! Гарантия на сенсор – 12 месяцев или 300 тестов.

Гарантия не распространяется на химические источники питания.

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по эксплуатации с указанием серийного номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство пользователя, из-за чего невозможно установить дату продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия.
5. Аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением нестандартных комплектующих и аксессуаров.

В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

Алкотестер Динго А-065

Производитель: Sentech Korea Corp.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.alcotester.ru

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

М.П.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, применяющего декларацию о соответствии)

Инспекция ФНС № 33 по г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 24.08.2009

(Ссылка на регистрацию организации или индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, marmen@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадалиня Саргиса Павели

(Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, от имени которой принимается декларация)

Алкотестеры: Dingo A-025(Динго А-025), Dingo A-055(Динго А-055),

Dingo A-065(Динго А-065), Dingo A-070(Динго А-070), Dingo pro (Динго про),

заявляют, что Dingo screen(Динго скрин), Dingo C-08(Динго С-08), Dingo C-12(Динго С-12), Dingo E-200(Динго Е-200) с принадлежностями: принтер, адаптер, кабель соединительный, карта памяти и кейс

Изготовитель продукции: SENTECH KOREA CORP.

#63-23 Shinchon-Ri, Gyoaha-Eup, Paju-si, Gyeonggi-do 413-832 Republic of Korea

Код ОК 005 (ОКП) 421510. Код ТН ВЭД СНГ 9027 10 100 0.

(Наименование, тип, марка продукции, на которую выдан(ы) регистрационный номер(ы) декларации, код ОК 005-03 и (или) ТН ВЭД) (СНП)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделий, результаты дообора, паспортная наименование изготовителя и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ Р 51522-99

(Обязательные нормативные документы, соответствие которым подтверждено данной декларацией в указанных пунктах, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

Сертификат РОСС KR.ME77.H00242 от 13.11.2012 ОС ООО «Элмаш» (РОСС RU.0001.11 ME77);

протокол испытаний № 294M11EM от 12.11.2012 ИЦ ООО «Элмаш» (РОСС RU.0001.21M104)

(ссылка на документы, являющиеся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 13.11.2012 Декларация о соответствии действительна до 13.11.2017



М.П.

(Подпись)

С.П.Бадалиня

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495) 7812587, факс (495) 7812588, e-mail: oc@anogremc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрированного (лицензии)

№ РОСС KR.ME77.D00241 от 13.11.2012

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)